

再使用禁止

アキュチェック セミディスポ ランセット

【警告】

- 1.採血部位に病原微生物が付着し感染の危険性があるため、採血部位を消毒してください。また、採血後はばんそうなどで止血と保護を行ってください。
傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けてください。
- 2.使用後の本品には血液が付着しています。病原微生物による感染を防ぐために、使用後は他人に触れないように廃棄してください。
- 3.本品を穿刺器具に取り付けたまま放置しないでください。[誤って穿刺される危険性があります。]

【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止。一度使用した本品は必ず廃棄してください。[感染の危険性があります。]
- 2.本品を穿刺器具に取り付けるときは、穿刺ボタンを押さないでください。[誤って穿刺されます。]
- 3.穿刺器具に取り付ける途中で取り外した本品は使用しないでください。[針が出たままの状態になったり、無菌性の保証ができない場合があります。]


【形状・構造及び原理等】

1.材質

- 針 : ステンレス鋼
- ランセット : ポリエチレン
- インナーガイド : ポリスチレン
- ケース : ポリスチレン

2.寸法

- 針の太さ: 30G

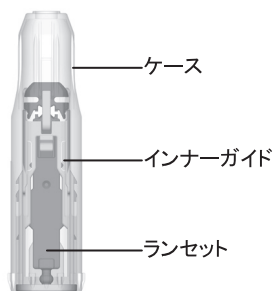

使用後はインナーガイド(薄紫色の部品)が前方に移動します。



使用前



使用后

組み合わせ医療機器(別売)

- 販売名 : アキュチェック セミディスポ
- 医療機器届出番号 : 33B2X00002000005

【使用目的又は効果】

本品は血糖値測定等のための微量採血を目的とします。放射線滅菌済みですのでそのまま直ちに使用できます。

【使用方法等】

- 1.本品を専用の穿刺器具(販売名:アキュチェック セミディスポ)に取り付けてください。取り付けるときは、奥までしっかりと差し込んでください。差し込むことで自動的に穿刺できる状態になります。
- 2.穿刺器具に取り付けた本品の先端を穿刺部位に押し当て、採血してください。
- 3.使用後は廃棄してください。
※詳細な使用方法は穿刺器具の添付文書を参照してください。

*【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1.指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
- 2.果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]
- 3.以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害
- 4.耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあります。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討してください。]

【保管方法及び有効期間等】

- 1.保管方法
水濡れや、直射日光、高温多湿をさけて保管してください。
- 2.使用期間
箱に記載しています。[自己認証(当社データ)による]

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売元 株式会社 旭ポリスライダー
〒719-3226 岡山県真庭市三崎 860-2
TEL 0867-42-1171
- 販売元 ロシュDCジャパン株式会社
フリーダイヤル : 0120-642-860