

機械器具( 49 )医療用穿刺器、穿削器、穿孔器  
管理医療機器器 37243002 単回使用自動ランセット

## ファストクリックス ランセット

### 再使用禁止

#### 【警告】 〈使用方法〉

組み合わせて使用する採血用穿刺器具は、個人使用の製品のため、絶対に複数の人で使いまわさないこと。  
【血液による感染の恐れがあります。】

#### 【禁忌・禁止】 〈使用方法〉

ランセットは使い捨てのため、再使用はしないこと。  
【血液由来の感染の恐れがあります。】

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 構造及び名称

ドラム外観



- 1個のドラムにランセットが6本入っています。)
- ランセットは穿刺針、保護キャップ、ランセットホルダーで構成されています。)

##### 2. 組成

穿刺針: ステンレススチール

#### \*\*【使用目的又は効果】

本品は、血液検査のために少量の血液検体を指先等の血管から採取する器具です。本品は、別途製造販売届出品目である専用の採血用穿刺器具と共に用います。本品は単回使用です。


#### \*\*【使用方法等】

〈組み合わせて使用する医療機器〉


本品は、「販売名 ファストクリックス 届出番号 13B1X10225000006」と組み合わせて使用します。

〈使用方法〉


##### 1. 本品の準備

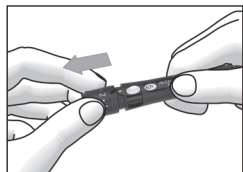

1) 採血用穿刺器具( 以下、穿刺器具 )の本体キャップを引っ張って外します。

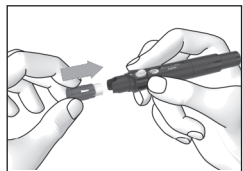

2) 本品を白い部分を奥にして、穿刺器具にカチッというまで差し込みます。  
中のランセットを使い切るまで外さないでください。

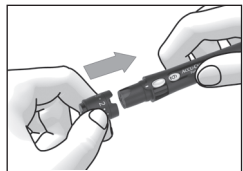


3) 本体キャップを溝に合わせて穿刺器具にとりつけます。



4) 穿刺器具の表示窓に数字の「6」が表示されていることと、キャップが浮いていないことを確認してください。これで、本品のセットは終了です。続けて、以下の採血方法をご確認ください。


##### 2. 指先又は耳朵からの採血方法

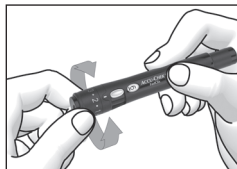

5) 深さ調節ダイヤルを回して、穿刺の深さを調節します。穿刺設定目安を参照してください。


穿刺設定目安

11段階の穿刺深度があります。

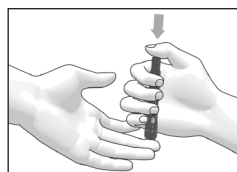


6) 穿刺部位を良く洗います。穿刺器具を穿刺部位に軽く当て、プランジャーを押します。穿刺した部分の周りを軽く押し、血液を必要量出します。

##### 3. 2本目以降のランセットの使用 (針は自動的に換わりません。)

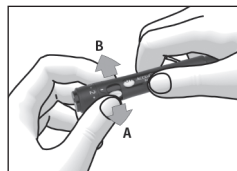


7) 次のランセットを使うときは、針交換レバーをAの方向へ移動させ、Bの方向へ戻します。表示されている数字がひとつ減ります。  
この作業は、新しいランセットを使用するときに一回だけ行ってください。

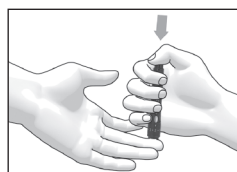


8) プランジャーを押して、穿刺を行ってください。  
ランセットは使い捨てですので、再使用はしないで、使用ごとに新しいものをセットしてください。

表示部に見える数字は、未使用のランセットの本数を示しています。使用ごとに数字は減っていきます。数字が「1」になったら、中のランセット6本を全部使用したことになります。新しいものに交換してください。

##### 4. 使用済みランセットの廃棄

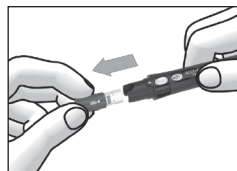

9) ランセットを全部使用したら、穿刺器具の本体キャップを外し、使用済みの本品を引っ張って外します。

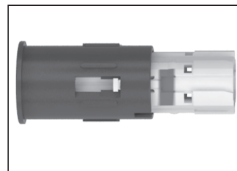

10) ドラムスリーブが移動し、ドラムに赤線が現れます。この赤線は使用済みを示します。再び穿刺器具にセットすることは出来ません。未使用品と混ざらないようにして、医療廃棄物として適切な処理をしてください。

